

Kanula Kateter Serbaguna  
(MR-32004 dan 2.080 model lainnya)


# **PETUNJUK PENGGUNAAN (INSTRUCTION FOR USE)**

- Untuk memastikan penggunaan produk yang benar dan aman, harap baca petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum digunakan.
- Manual ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pertanyaan atau acuan selama proses penggunaan.
- Pastikan untuk memahami dan mematuhi semua peringatan terkait stabilitas dan keselamatan dengan benar.
- Setelah membaca, simpanlah petunjuk penggunaan ini di tempat yang aman untuk digunakan dimasa mendatang.

## ■ DAFTAR ISI

Komposisi Produk dan Nama Komponen .....	Halaman 3
Peringatan dan Tindakan Pencegahan Penggunaan .....	Halaman 4 ~5
Deskripsi Produk.....	Halaman 6

## ■ Konfigurasi Produk

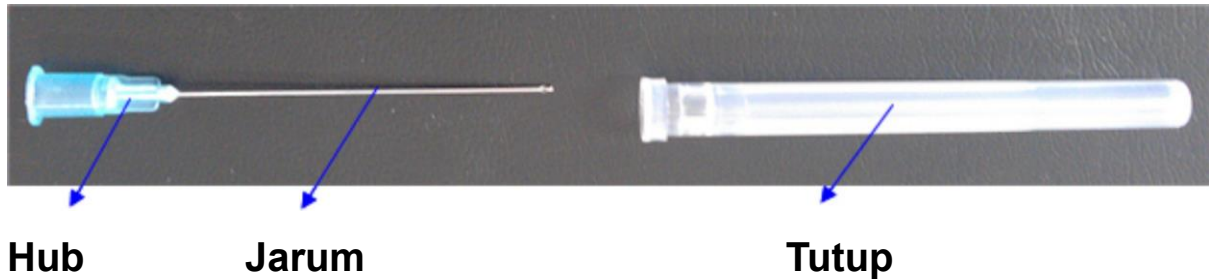

### Hub

→ Memasang jarum dan menghubungkannya ke instrumen lain.

### Jarum

→ Digunakan untuk masuk ke dalam tubuh dan menyuntikkan obat.

### Tutup

→ Digunakan sebagai penutup jarum dan mencegah kerusakan pada jarum.

# ■ Peringatan dan Tindakan Pencegahan Penggunaan

## Tujuan Penggunaan

Produk ini dihubungkan ke konektor atau selang dengan kanula yang dimasukkan secara umum ke dalam pembuluh darah atau rongga tubuh.

## Persiapan Sebelum Penggunaan

1. Produk ini telah disterilkan sepenuhnya dan disegel, jadi periksa apakahemasannya rusak atau tidak.
2. Jika kemasan rusak, jangan gunakan produk ini.

## Cara Penggunaan

1. Setelah memeriksa kondisi kemasan produk, buka kemasan dan periksa apakah ada cacat pada produk.
2. Buka pembungkus, keluarkan kanula kateter serbaguna, dan gunakan dengan menggabungkannya ke perangkat penghubung lainnya.
3. Pastikan untuk membuka kemasan sesaat sebelum digunakan.

## Cara Penyimpanan dan Pengelolaan Setelah Penggunaan

1. Produk ini hanya untuk sekali pakai, jadi tidak boleh digunakan kembali.
2. Produk ini hanya untuk sekali pakai, jadi harus dibuang dengan aman setelah digunakan.

## Tindakan Pencegahan Penggunaan

1. Karena produk ini hanya untuk sekali pakai, produk harus dibuang setelah digunakan. Dilarang mensterilkan ulang atau menggunakan kembali produk ini.
2. Jangan gunakan produk yang kemasan individunya (tunggal) sudah terbuka atau rusak karena tidak terjamin sterilisasinya.
3. Berhati-hatilah karena penggunaan produk yang terkontaminasi dapat menularkan berbagai penyakit menular.
4. Jangan gunakan kanula yang telah rusak atau bengkok sebelum digunakan.
5. Dilarang menggunakan produk apabila ditemukan benda asing pada produk sebelum digunakan.
6. Dilarang menggunakan produk diluar tujuan prosedur umum.

## Metode Penyimpanan dan Masa Kadaluarsa

1. Metode penyimpanan: Simpan pada suhu ruangan dan hindari sinar matahari langsung dan kelembapan tinggi.
2. Masa kadaluarsa: 3 tahun dari tanggal produksi.

## Informasi Terkait Pelaporan Efek Samping

Korea Medical Device Safety Information Service (+82-080-080-4183)

## ■ Deskripsi Produk

1. Nama produk: Kanula kateter serbaguna (Sekali pakai)
2. Nama model: MR-32004 dan 2.080 model lainnya
3. Nama dagang produsen: Nanum Company Co., Ltd
4. Alamat produsen: 138 Gomo-ro, Suseong-gu, Daegu
5. Kontak produsen: TEL) 053-795-7076-7 / FAX) 053-795-7078
6. Nomor izin usaha manufaktur: No. 4869
7. Nomor izin barang: Jane 13-501
8. Unit pengemasan: Unit pengemasan perusahaan