

通用型導管套管
(MB-18100 及其他 2,080 種型號)

使用說明書

(INSTRUCTION FOR USE)

- 為確保正確且安全地使用本產品，請於使用前仔細閱讀本使用說明書。
- 本說明書可作為使用過程中查詢或確認事項時之參考依據。
- 請務必正確理解並遵循所有穩定性及安全相關之注意事項。
- 閱讀後請妥善保存本使用說明書，以供日後參考。


■ 目錄

產品構成及各部位名稱 …… 3

使用注意事項 …… 4~5

產品說明 …… 6

■ 產品構成

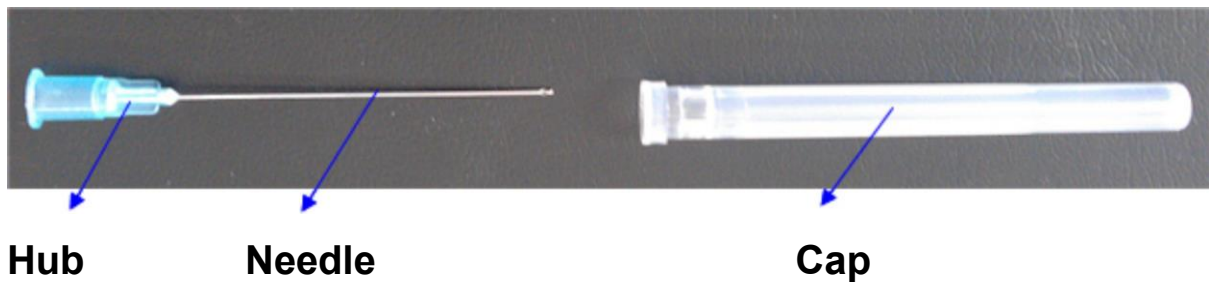

HUB (接頭)

→ 用於固定針管，並連接其他醫療器材。

Needle (針管)

→ 用於穿刺人體組織及注入藥物。

Cap (保護蓋)

→ 作為針管保護用，以防止針管受損。

■ 使用方法與注意事項

使用目的

本產品係與連接器或導管連接使用之導管套管，可通用性地插入血管或體腔，供醫療處置使用。

使用前準備

- 1.本產品已完全滅菌並密封包裝，使用前請確認包裝是否完整無破損。
- 2.如包裝有破損或異常情形，不得使用。

使用方法

- 1.確認產品包裝狀態正常後開封，並再次確認產品本體無任何異常。
- 2.打開包裝後，取出通用型導管套管，並與其他連接器材配合使用。
- 3.本產品請於使用前立即開封。

使用後之保存與管理

- 1.本產品為一次性使用醫療器材，嚴禁重複使用。
- 2.使用後請依醫療廢棄物相關法規，安全丟棄處理。

使用注意事項

- 1.本產品為一次性使用醫療器材，使用後應立即丟棄，嚴禁再次滅菌或重複使用。
- 2.單件（獨立）包裝如有開封、破損或異常情形，因無法確保其無菌狀態，不得使用。
- 3.使用受污染之產品，可能導致感染或各類傳染性疾病之傳播，請審慎使用。
- 4.使用前如發現套管（Cannula）已有彎曲、破損或結構異常，不得使用。
- 5.使用前如發現產品內含異物或污染物，嚴禁使用。
- 6.本產品僅限用於一般醫療處置目的，不得用於核准用途以外之其他用途。

儲存方式與有效期限

- 1.儲存方式：請於室溫下保存，並避免陽光直射、高溫及高濕環境。
- 2.有效期限：自製造日期起算三（3）年。

不良反應通報相關諮詢

韓國醫療器材安全資訊服務中心

（ Korea Medical Device Safety Information Service ）

電話：+82-80-080-4183

■ 產品說明

- 1.產品名稱：通用型導管套管（一次性使用）
- 2.型號名稱：MB-18100 及其他 2,080 種型號
- 3.製造商名稱：Nanum Company Co., Ltd.
- 4.製造商地址：韓國 大邱廣域市 壽城區 Gomo-ro 138 號
- 5.製造商聯絡方式：
TEL：+82-53-795-7076 ~ 7077
FAX：+82-53-795-7078
- 6.製造業許可證號碼：第 4869 號
- 7.品項許可證號碼：Jane 第 13-501 號
- 8.包裝單位：公司標準包裝單位