

“藍侖”拋棄式鈍針 “Nanum” Mirror Cannula

衛部醫器輸字第 032055 號

注意:使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品敘述/用途

本產品用於皮膚填充類產品如玻尿酸等之真皮／皮下注射。它為一次性使用之滅菌醫療器材。

使用說明

使用前:

1. 本產品是完全滅菌及密封，檢查包裝是否損壞。
2. 如包裝損壞不要使用。

如何使用:

3. 如產品包裝狀況無異常，打開產品檢查是否有瑕疵。
4. 打開包裝取出本產品並將其與其它醫材連接使用。
5. 使用前不可打開包裝。

使用後如何保存和管理

6. 本產品是拋棄式的，絕對不要重覆使用。
7. 請檢查產品包裝及本體是否有損壞。
8. 使用後需要安全地丟棄。

使用注意事項

1. 本產品是一次性使用，使用後應立即丟棄。禁止二次滅菌使用。
2. 如單一包裝打開或損壞，不要使用，因為無法保證滅菌的有效性。
3. 如沾染到受污染的產品，可能會傳播疾病如各種傳染疾病。
4. 如發現針頭已損壞或彎曲時，請勿使用。
5. 如產品發現有異物，請勿使用本產品。
6. 請勿將本產品用於任何醫療程序以外的其他用途。

保存期限

自滅菌日起3年內。

儲存條件

室溫（10°C 至 25°C）下儲存，避免陽光曝曬。保持乾燥。

型號規格

No.	Gauge	Model Name	Cannula Tube		Hub	Normal Cap Length(a)	Straw Cap Length(b)
			A (length)	B (O.D)			
1	21	MC-21070	70 (+1.5/-2.5)	0.800~0.830	Normal	97	-
2		MC-21050	50 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
3		MC-21070C	70 (+1.5/-2.5)		Screw	97	-
4		MC-21050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
5	22	MC-22050	50 (+1.5/-2.5)	0.698~0.730	Normal	75.9	-
6		MC-22050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
7	23	MC-23070	70 (+1.5/-2.5)	0.600~0.673	Normal	97	-
8		MC-23050	50 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
9		MC-23030	30 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
10		MC-23070C	70 (+1.5/-2.5)		Screw	97	-
11		MC-23050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
12		MC-23030C	30 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
13	24	MC-24050	50 (+1.5/-2.5)	0.550~0.580	Normal	75.9	-
14		MC-24050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
15	25	MC-25070	70 (+1.5/-2.5)	0.500~0.530	Normal	97	-
16		MC-25050	50 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
17		MC-25040	40 (0/-4)		Normal	75.9	-
18		MC-25070C	70 (+1.5/-2.5)		Screw	97	-
19		MC-25050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
20		MC-25040C	40 (0/-4)		Screw	75.9	-
21	27	MC-27050	50 (+1.5/-2.5)	0.400~0.420	Normal	75.9	-
22		MC-27040	40 (0/-4)		Normal	75.9	-
23		MC-27030	30 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
24		MC-27050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
25		MC-27040C	40 (0/-4)		Screw	75.9	-
26		MC-27030C	30 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
27	30	MC-30030	30 (+1.5/-2.5)	0.298~0.320	Normal	75.9	-
28		MC-30025	25 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
29		MC-30030C	30 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
30		MC-30025C	25 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
31	17	MC-17070	70 (+1.5/-2.5)	1.430~1.510	Normal	97	-
32		MC-17100	100 (+1.5/-2.5)		Normal	117.5	-
33		MC-17120	120 (+1.5/-2.5)		Normal	-	135
34		MC-17150	150 (+1.5/-2.5)		Normal	-	165
35		MC-17150I	150 (+1.5/-2.5)		I.	-	165

36		MC-17120I	120 (+1.5/-2.5)		I.	-	135
37		MC-17100I	100 (+1.5/-2.5)		I.	117.5	-
38		MC-17070I	70 (+1.5/-2.5)		I.	97	-
39	18	MC-18070	70 (+1.5/-2.5)	1.200~1.300	Normal	97	-
40		MC-18050	50 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
41		MC-18070C	70 (+1.5/-2.5)		Screw	97	-
42		MC-18050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
43	18	MC-18070I	70 (+1.5/-2.5)	1.200~1.300	I.	97	-
44		MC-18050I	50 (+1.5/-2.5)		I.	75.9	-
45	19	MC-19070	70 (+1.5/-2.5)	1.030~1.100	Normal	97	-
46		MC-19050	50 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
47	19	MC-19070I	70 (+1.5/-2.5)	1.030~1.100	I.	97	-
48		MC-19050I	50 (+1.5/-2.5)		I.	75.9	-
49	20	MC-20100	100 (+1.5/-2.5)	0.860~0.920	Normal	117.5	-
50		MC-20070	70 (+1.5/-2.5)		Normal	97	-
51		MC-20050	50 (+1.5/-2.5)		Normal	75.9	-
52	20	MC-20100C	100 (+1.5/-2.5)	0.860~0.920	Screw	117.5	-
53		MC-20070C	70 (+1.5/-2.5)		Screw	97	-
54		MC-20050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
55	14	MD-14200S	200 (+1.5/-2.5)	1.950~2.150	S.	-	220
56	32	MR-32004	4 (+1/-2)	0.229~0.241	Normal	75.9	-
57		MR-32008	8 (+1/-2)		Normal	75.9	-
58		MR-32013	13 (+1/-2)		Normal	75.9	-
59	33	MR-33004	4 (+1/-2)	0.203~0.216	Normal	75.9	-
60		MR-33008	8 (+1/-2)		Normal	75.9	-
61		MR-33013	13 (+1/-2)		Normal	75.9	-
62	34	MR-34004	4 (+1/-2)	0.178~0.191	Normal	75.9	-
63		MR-34008	8 (+1/-2)		Normal	75.9	-
64		MR-34013	13 (+1/-2)		Normal	75.9	-

Disposable type

No.	Gauge	Model Name (Model A + Model B)	Model A	Model B
65	17	MCR17100-17	MC-17100	MR-17030
66		MCR17120-17	MC-17120	MR-17030
67		MCR17150-17	MC-17150	MR-17030
68		MCR17070-17	MC-17070	MR-17030
69	18	MCR18050-18	MC-18050C	MR-18030

三奇(器)藥

70		MCR18070-18	MC-18070C	MR-18030
71	20	MCR20050-20	MC-20050C	MR-20030
72		MCR20070-20	MC-20070C	MR-20030
73	21	MCR21050-21	MC-21050C	MR-21025
74		MCR21070-21	MC-21070C	MR-21025
75	22	MCR22050-21	MC-22050C	MR-21025
76	23	MCR23030-22	MC-23030C	MR-22025
77		MCR23050-22	MC-23050C	MR-22025
78		MCR23070-22	MC-23070C	MR-22025
79	24	MCR24050-23	MC-24050C	MR-23025
80	25	MCR25040-23	MC-25040C	MR-23025
81		MCR25050-23	MC-25050C	MR-23025
82		MCR25070-23	MC-25070C	MR-23025
83	27	MCR27030-26	MC-27030C	MR-26013
84		MCR27040-26	MC-27040C	MR-26013
85		MCR27050-26	MC-27050C	MR-26013
86	30	MCR30025-27	MC-30025C	MR-27013
87		MCR30030-27	MC-30030C	MR-27013

Model A

Gauge	Model Name	Cannula Tube		Hub	Normal Cap Length(a)	Straw Cap Length(b)
		A (length)	B (O.D)			
21	MC-21070C	70 (+1.5/-2.5)	0.800~0.830	Screw	97	-
	MC-21050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
22	MC-22050C	50 (+1.5/-2.5)	0.698~0.730	Screw	75.9	-
23	MC-23070C	70 (+1.5/-2.5)	0.600~0.673	Screw	97	-
	MC-23050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
	MC-23030C	30 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
24	MC-24050C	50 (+1.5/-2.5)	0.550~0.580	Screw	75.9	-
25	MC-25070C	70 (+1.5/-2.5)	0.500~0.530	Screw	97	-
	MC-25050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
	MC-25040C	40 (0/-4)		Screw	75.9	-
27	MC-27050C	50 (+1.5/-2.5)	0.400~0.420	Screw	75.9	-
	MC-27040C	40 (0/-4)		Screw	75.9	-
	MC-27030C	30 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
30	MC-30030C	30 (+1.5/-2.5)	0.298~0.320	Screw	75.9	-
	MC-30025C	25 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-
17	MC-17070	70 (+1.5/-2.5)	1.430~1.510	Normal	97	-

	MC-17100	100 (+1.5/-2.5)		Normal	117.5	
	MC-17120	120 (+1.5/-2.5)		Normal	-	135
	MC-17150	150 (+1.5/-2.5)		Normal	-	165
18	MC-18070C	70 (+1.5/-2.5)	1.200~1.300	Screw	97	
	MC-18050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	
20	MC-20070C	70 (+1.5/-2.5)	0.860~0.920	Screw	97	-
	MC-20050C	50 (+1.5/-2.5)		Screw	75.9	-

Model B

Gauge	Model Name	Cannula Tube		Hub	Normal Cap Length(a)	Straw Cap Length(b)
		A (length)	B (O.D)			
17	MR-17030	30(+1.5/-2.5)	1.430~1.510	Normal	75.9	-
18	MR-18030	30 (+1.5/-2.5)	1.200~1.300	Normal	75.9	-
20	MR-20030	30 (+1.5/-2.5)	0.860~0.920	Normal	75.9	-
21	MR-21025	25 (+1.5/-2.5)	0.800~0.830	Normal	75.9	-
22	MR-22025	25 (+1.5/-2.5)	0.698~0.730	Normal	75.9	-
23	MR-23025	25 (+1.5/-2.5)	0.600~0.673	Normal	75.9	-
26	MR-26013	13 (+1/-2)	0.440~0.470	Normal	75.9	-
27	MR-27013	13 (+1/-2)	0.400~0.420	Normal	75.9	-

Cannula tube, normal cap, straw cap等單位: mm

B(O.D.): 外徑

製造業者名稱: NANUM Company Co., Ltd

製造業者地址: 138, Gomo-ro, Suseong-gu, Daegu, Korea

醫療器材商名稱: 傑出美國國際有限公司

醫療器材商地址: 「備註: 本項不核定於標籤、說明書或包裝, 市售品請逕依所轄衛生局最新核定之內容刊載醫療器材商地址」


Photo for Cannula(MC)

Pink Hub 17G 100mm / MC-17100I



生 和
騎 經
(器)
藥 物

11

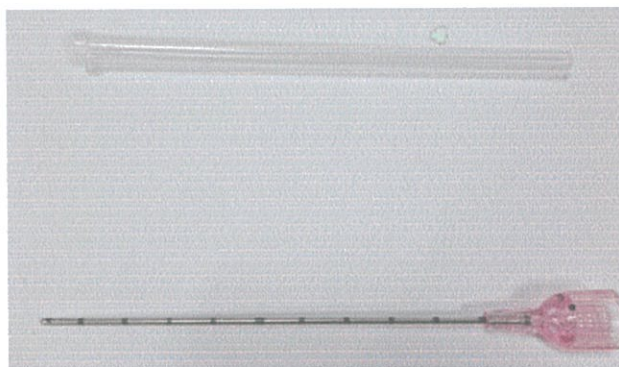



Hub(connector) material: Polycarbonate

16



Photo for Micro Cannula(MD)


14G 200mm / MD-14200S

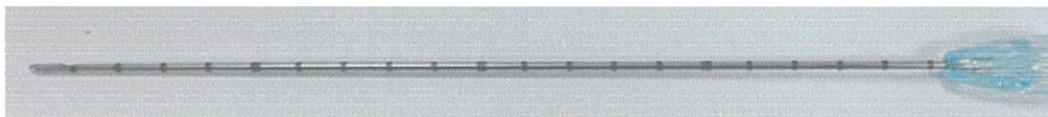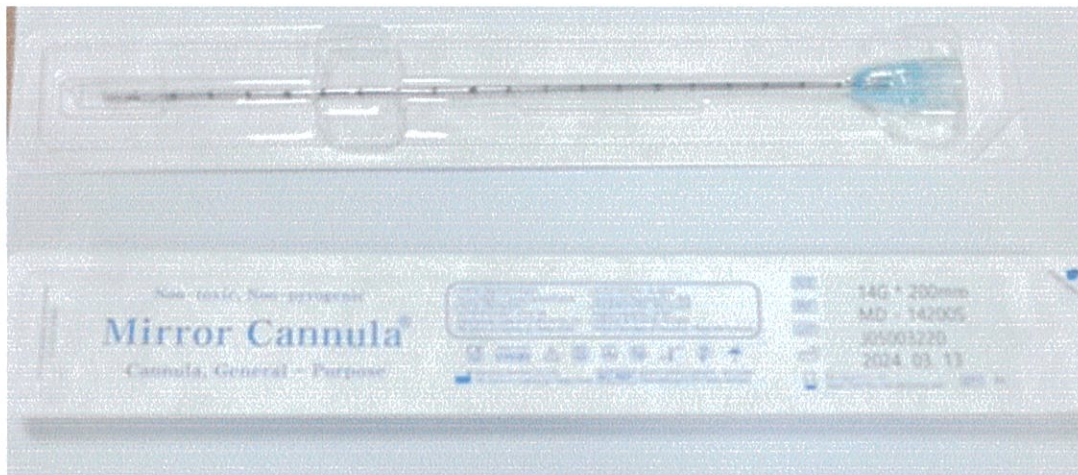

Hub(connector) material: Polycarbonate

Photo for Cannula(MC)

23G 50mm / MC-23050

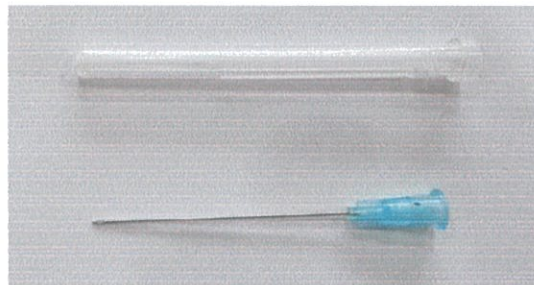

Cannula Hub(connector) material: Polypropylene



二
子
器
材

114

;

Photo for Cannula(MC)

27G 70mm / MC-25070C

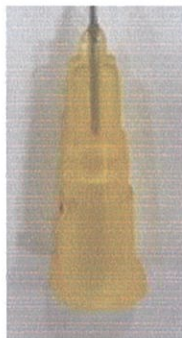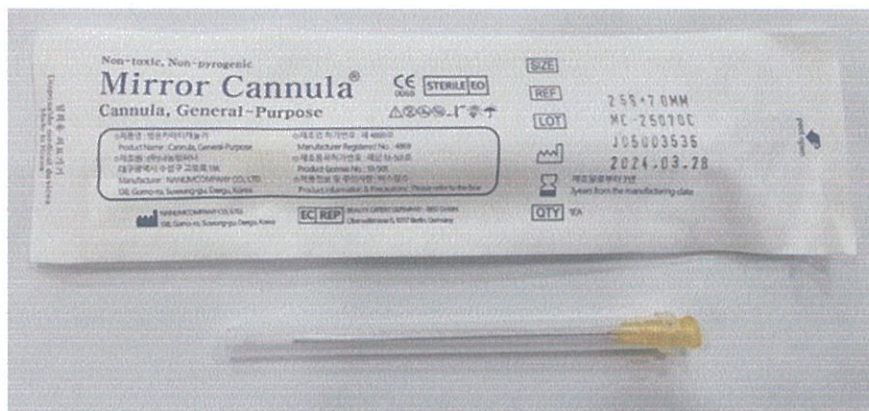


Cannula Hub(connector) material: Polycarbonate

5. 輪管

Photo for Cannula(MCR)

MCR23050-22

Combining MR and MC models / MC-23050C & MR-22025

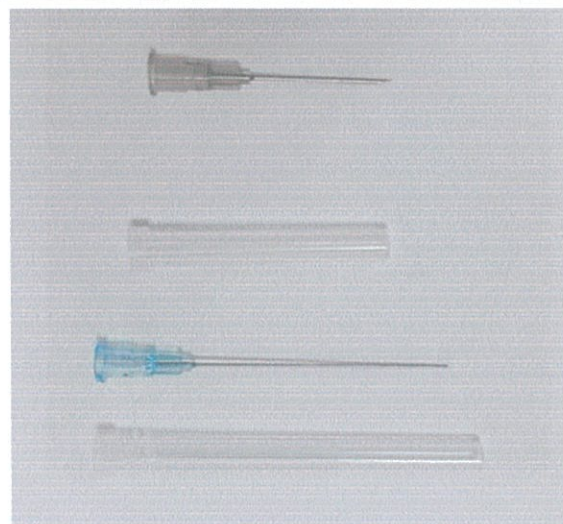

Cannula Hub(connector) material: Polycarbonate

Micro Cannula Hub(connector) material: Polypropylene

