

재소독 캐놀러

첨부 문서

2025.07.28



01 제조업자 상호와 주소

-(주)나눔컴퍼니
-대구광역시 수성구 고모로41길 5



02 허가 정보

-제조업 허가번호: 제 4869호
-품목 허가(인증) 번호: 제인 08-772호
-명칭(제품명, 품목명, 모델명): 범용카테터캐놀러, NC1-19050L 외 2867건
-QTY: 1EA



03 사용목적

혈관이나 체강에 삽입하여 커넥터 또는 튜브 등에 연결하여 흡인 및 주입을 목적으로 함




04 보관 또는 저장방법

-실온 보관



05 부작용 보고 관련 문의처

-한국의료기기안전정보원(080-080-4183)

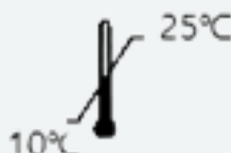

재소독 캐놀러

첨부 문서

2025.07.28

06 사용방법



가. 사용전의 준비사항

- 1) 보관중인 카테터캐놀러가 사용하기 위한 청결상태 및 멸균상태를 유지하는지 확인한다.
- 2) 멸균복을 착용하지 않은 사람은 멸균된 기구에 닿지 않도록 한다.
- 3) 사용 전에 외관상 현저한 변형이나, 편홀, 이물질 부착 등을 확인하여야 한다.
- 4) 멸균
 - ㉠ 멸균하는 방법은 고압증기멸균으로 한다.
 - ㉡ 멸균시에 멸균방법을 준수하고 설비는 제조회사의 사용방법에 따른다.
 - ㉢ 멸균과 건조 시 기구간에 최소한의 접촉을 하도록 배분하여 트레이에 보관한다.

나. 사용방법

- 1) 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
- 2) 심한 충격이나 바닥에 떨어뜨렸을 경우, 다른 기구로 대체하여 사용한다.
- 3) 사용도중 부식이나 크랙 등이 발견되었을 경우 즉시 사용을 중단하고 다른 기구로 대체하여 사용한다.

다. 사용 후의 보관 및 관리방법

- 1) 세척 : 카테터캐놀러는 사용 후 혈액이나 이물질이 말라붙는 것을 방지하거나 다른 혈액이나 이물질을 제거하기 위해 먼저 물에 담근 다음 손이나 기계로 세척한다.
- 2) 검사
효과적인 멸균을 위해 세척상태를 확인한다.

07 사용 시 주의사항



- 1) 기구의 멸균 시 열폭이 발생할 수 있으므로 멸균기 제조업체의 지시사항에 따라야 하며, 수증기가 완전히 제거될 때까지 커버를 열지 않도록 한다.
- 2) 세척이 철분이 많이 포함되어 있는 물을 사용할 경우 녹으로 채색된 피막이 형성될 수 있으므로 전문가에게 상수처리 문제의 평가수치를 의논한 후 사용한다.
- 3) 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
- 4) 보관 및 사용 시 문제가 발생하면 제조회사에 연락을 위하여 사후조치 및 재발 방지를 강구한다.

