

일회용 범용카테터캐놀러

첨부 문서

2025.07.28



01 제조업자 상호와 주소

-(주)나눔컴퍼니
-대구광역시 수성구 고모로41길 5



02 허가 정보

-제조업 허가번호: 제 4869호
-품목 허가(인증) 번호: 제인 13-501호
-명칭(제품명, 품목명, 모델명): Mirror Cannula 등, 범용카테터캐놀러, MC-14200 외 2080건
-QTY: 1EA



03 사용목적

혈관이나 체강에 범용적으로 삽입하는 캐놀러로 커넥터 또는 튜브에 연결된다.




04 보관 또는 저장방법

-상온에서 보관하고, 직사광선을 피한다.
-고온다습한 곳을 피한다.



05 부작용 보고 관련 문의처

-한국의료기기안전정보원(080-080-4183)

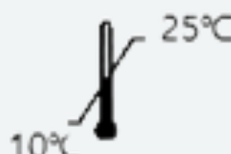

일회용 범용카테터캐놀러

첨부 문서

2025.07.28

06 사용방법



가. 사용 전 준비사항

- 1) 본 제품은 완전멸균 밀폐되어 있으므로 포장의 파손유무를 확인한다.
- 2) 포장이 파손된 경우는 사용하지 않는다.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 제품의 포장상태를 확인한 후 이상이 없을시 개봉하며, 제품의 이상 유무를 확인한다.
- 2) 포장지를 개봉하여 범용카테터캐놀러를 꺼낸 뒤, 다른 연결기기와 연결하여 사용한다.
- 3) 사용직전 개봉한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용이므로, 절대 재사용하지 않는다.
- 2) 본 제품은 일회용이므로, 사용 후 안전하게 폐기한다.

07 사용 시 주의사항



가. 본 제품은 1회용이므로 사용 후 폐기하여야 하며, 재 멸균하여 재사용하는 것을 금한다.

나. 개별(날개)포장이 개봉되거나 파손되어 있는 제품은 멸균을 보장할 수 없으므로 사용을 금한다.

다. 오염된 제품에 찔리게 되면 각종 감염질환과 같은 질병에 전염될 수 있다.

라. 사용 전 손상을 받았거나 휘어진 침은 사용을 금한다.

마. 사용 전 제품에 이물질이 발견되면 사용을 금한다.

바. 일반적인 시술목적 이외의 사용을 금한다.

일회용 멸균 의료기기

재사용 금지

MD

STERILE EO

