

# 주사기

# 첨부 문서

2026.05.15



## 01 제조업자 상호와 주소

-(주)나눔컴퍼니  
-대구광역시 수성구 고모로41길 5



## 02 허가 정보

-제조업 허가번호: 제 4869호  
-품목 허가(인증) 번호: 제인 20-4166호  
-명칭(제품명, 품목명, 모델명): Nanum Syringe, 주사기, NS-50 외 50건  
-QTY: 1EA



## 03 사용목적

의약품 등을 체내에 주입 및 지방채취를 하는데 사용하는  
플라스틱 멸균 주사기



## 04 보관 또는 저장방법

-실온에서 보관하고 직사광선 및 고온다습한 곳을 피한다.



## 05 부작용 보고 관련 문의처

-한국의료기기안전정보원(080-080-4183)



# 주사기 첨부 문서

2026.05.15

## 06 사용방법

### 1) 사용 전 준비사항

(1) 제품 개봉 전, 포장된 주사기의 이상유무 (부품누락 등) 및 포장의 완전성을 확인한 후, 이상이 없을 시 개봉한다.

### 2) 조작방법

(약물을 주입하고자 하는 경우)

(1-1) 포장지를 개봉하여 주사기를 꺼낸 뒤, 알맞은 게이지의 범용카테터캐놀러 (별도인증제품)를 선택하여 통끝에 연결한다.

(1-2) 밀대를 후퇴시켜 약액을 흡입한 후 밀대를 전진시켜 주사기 내의 공기를 제거한다.

(1-3) 해당 부위를 깨끗이 소독한 후 별도인증 제품으로 해당부위를 천자 한다.

(1-4) 범용카테터캐놀러가(별도인증제품) 결합된 주사기를 천자한 부위에 삽입 후 밀대를 눌러 주사한다.

(1-5) 주사기 사용 후 주사액의 누출을 차단하고 외부 교차 오염을 방지하기 위하여 동봉된 앞마개를 결합하여 밀봉한다.

(1-6) 시술부위를 소독된 거즈로 압박하여 지혈시킨다.

(지방채취를 하고자 하는 경우)

(2-1) 주사기와 결합된 범용카테터캐놀러를 천자된 부위에 삽입 후 밀대를 후퇴시켜 지방 및 약물을 흡입한다.

(2-2) 클립이 부착된 50ml 시린지의 경우 락킹기능(음압유지)을 이용하여 흡입을 용이하게 한다.(50ml 시린지의 경우 30ml, 50ml 부위에 락킹(음압유지)이 가능)

(2-3) 흡입이 완료되면 주사기와 결합된 캐놀러를 몸속에서 빼내고 주사기 락킹을 해제하여 음압을 푼다.밀대 분리형 모델의 경우, 사용 후 밀대와 분리된 흡자 결합부(밀대캡)는 외통 하단부에서 내부 잔류물의 유출을 차단하고 외부 오염원 유입을 방지하는 용도로 사용할 수 있다.

(2-4) 시술부위를 소독된 거즈로 압박하여 지혈시킨다.

(2-5) 흡입된 약물 및 지방 등의 폐기 시, 배출 유닛을 기밀하게 결합한 후, 약물 및 지방을 천천히 밀어 폐기한다. 이때 배출 유닛은 좁은 유로를 통해 유체가 일정한 방향으로 배출되며 비산이 억제되어, 외부 유출 및 작업자의 감염 노출과 환경 오염을 최소화할 수 있다.

### 3) 사용 후의 보관 및 관리방법

(1) 1회 사용 후 폐기하며 재사용은 절대 금한다. (재사용 금지)

일회용 멸균 의료기기

재사용 금지

# 주사기 첨부 문서

2026.05.15

## 07 사용 시 주의사항

### 가. 경고

: 본 제품은 1회용이므로 사용 후 폐기하여야 하며, 재멸균하여 재사용을 금한다.

### 나. 일반적 주의

: 본 제품은 의료기기이며, 사용목적 및 사용방법, 주의사항을 숙지하고 사용한다.

### 다. 사용상의 주의

- 1) 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용을 금한다.
- 2) 유효기간이 경과된 제품의 사용을 금한다.
- 3) 사용 전 포장의 손상 및 이물질 발견 시 사용을 금한다.
- 4) 사용직전에 개봉하고 개봉 후 바로 사용한다.

일회용 멸균 의료기기

재사용 금지